

FICHE ACCESSOIRE


E07L E08L E09L

Équipés de roues pneumatiques



Ultra pratique, le gonfleur électrique multifonction permet de gonfler les roues pneumatiques des fauteuils ErgoConcept. Facile, il suffit de régler la pression souhaitée et c'est reparti !

Les "+": Lampe LED intégrée, recharges (allume-cigare/USB)

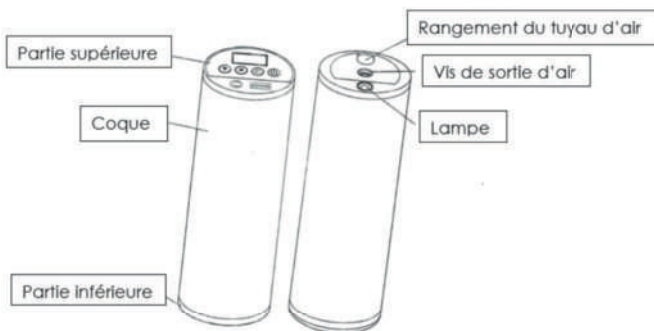

Référence	ACE003
Pression préconisée	2,4 BAR
Voltage	DC15V
Courant max	5A
Batterie	4X500mAH
Dimensions (L x l x h)	16,9 x 5,48 x 4,48 cm
Compatibilité	E07L, E08L, E09L

Panneau de contrôle



Multifonction

Une solution multi-usages:

- GONFLEUR
- MESURE DE PRESSION
- CHARGEUR USB
- LAMPE LED
- RECHARGE FACILE*

*(sur fauteuil ErgoConcept à l'aide du chargeur USB, vendu en option)

Utilisation

E07L E08L E09L

Étape 1: Visser le tuyau d'air, côté rouge, sur le gonfleur, puis le côté noir sur la valve du fauteuil ErgoConcept.

Étape 2: Allumer le gonfleur en appuyant sur le bouton SET (La pression actuelle du pneu s'affiche). Sélectionner l'unité de mesure "BAR" en appuyant sur le même bouton.

Étape 3: À l'aide des flèches, choisir la pression souhaitée (2,4 BAR) puis appuyer sur le bouton START pour lancer le gonfleur (il s'arrêtera automatiquement une fois la pression atteinte)

Étape 4: Éteindre le gonfleur en appuyant 3 secondes sur le bouton SET. Dévisser le tuyau d'air de la roue et remettre la valve.



Autres fonctionnalités:



Lampe LED

Appuyer sur le bouton START pour allumer ou éteindre la lampe (écran LCD éteint).



Chargeur USB

Appuyer 3 secondes sur la flèche du haut pour charger le téléphone (écran LCD éteint).



Charge / fauteuil

Recharger le gonfleur depuis votre fauteuil ErgoConcept. (Accessoire en option - ref AC00300)