

ERGO
CONCEPT



ERGO ATLAS

NOUVEAU

Système
révolutionnaire !



ERGO
ATLAS 40

Facilement démontable



ERGO
ATLAS 40 *ISOFIX*

Adaptation coffre plat

LA 1^{ÈRE} GRUE DE COFFRE AMOVIBLE

Sans percer ou endommager le coffre

Manipulation sans effort par système électrique

FICHE PRODUIT

Installation Facile

Peut être retiré du coffre sans effort

ERGO ATLAS 40



Base de fixation

ERGO ATLAS 40 ISOFIX



Base de fixation



Mât / Potence

Manipulation télécommandée



Option Pack ERGO ATLAS



Batterie avion 10A
ERGOCONCEPT
et chargeur compatible

Utilisation du ERGO ATLAS

ETAPE 1 >>

Faire pivoter la mât vers l'extérieur du coffre jusqu'à la position la plus adéquate. Si nécessaire, utilisez le palan.




<< ETAPE 2

Branchez le câble d'alimentation du ERGO ATLAS à votre fauteuil ou scooter ERGOCONCEPT (ou directement à la batterie si Pack ERGO ATLAS).



ETAPE 3 >>

Utilisez la télécommande pour abaisser le crochet puis attachez-le solidement à l'endroit approprié sur votre fauteuil ou votre scooter.

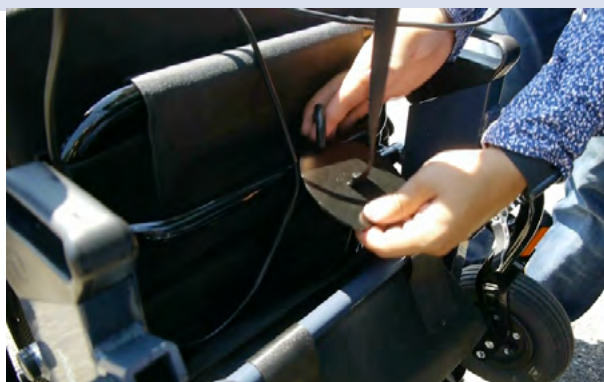

<< ETAPE 4

Lever la charge jusqu'au seuil du coffre puis faites pivoter avec précaution la potence vers l'intérieur du véhicule, avant de faire descendre la charge.



Caractéristiques techniques



▶ Scannez-moi !

40 kg
de charge

Mât entièrement
démontable



ERGO
ATLAS 40

Longueur totale : 88 cm
Largeur totale : 60 cm
Structure : 5,4 kg
Mât : 5,6 kg



ERGO
ATLAS 40 ISOFIX

Réglable en profondeur : de 62 à 90 cm
Réglable en largeur : de 85 à 122 cm
Structure : 8,5 kg
Mât 5,6 kg

OPTION
Alimentation
par batterie avion
ERGOCONCEPT



| | |
|-----------------------|--|
| Poids (hors batterie) | Mât 5,6 kg |
| Hauteur du mât | De 65 à 105 cm |
| Charge max. | 40 kg |
| Compatibilité coffre | À VÉRIFIER AVANT ACHAT, selon votre véhicule. |

| ALIMENTATION | |
|-----------------|--|
| Ergo Atlas | Par câble d'alimentation fourni, directement branché sur votre fauteuil ou scooter ERGOCONCEPT (batterie 24V 10A). |
| Pack Ergo Atlas | Branchement sur batterie incluse dans le Pack Ergo Atlas (Réf.9E04 24V 10A). ATTENTION ! Utilisez votre Pack ERGO ATLAS uniquement avec les dispositifs électriques, batteries et chargeurs ERGOCONCEPT compatibles. |

Voir tous les produits ErgoConcept sur www.ergoconcept.net

ERGOCONCEPT - 35, rue du Petit Bois - ZAC Les Platières - Bâtiment D - 69440 MORNANT - France

Tél : +33 477 40 09 97 - Fax : +33 426 29 90 11 - Email : contact@ergoconcept.net - www.ergoconcept.net

R.C.S LYON : 803 494 822 - Capital social : 60 000 € - Images non contractuelles soumises à modifications.

