

CLIP'GO

Contenu du carton



Détails des Platines



INSTALLATION

Avant d'installer le Clip'Go, débranchez les câbles des servo moteurs, et enlevez les servo moteurs du fauteuil E08L.


ETAPE 1

Installation des platines servo-moteurs

A l'aide d'une clé ALLEN #4 Vissez les platines sur chaque servo moteur

⚠ Attention au sens gauche / droit à respecter : repérez le bon côté grâce aux détrompeurs

⚠ La tige platine doit se trouver du côté du câble

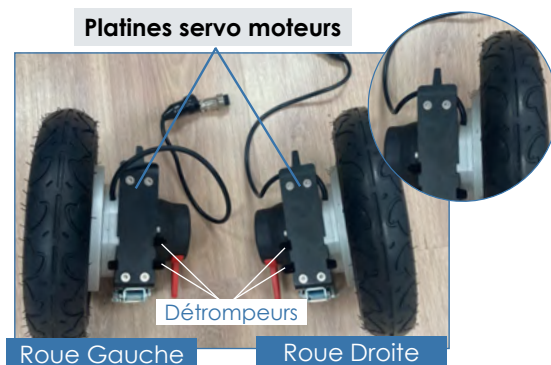


ETAPE 2


Installation des platines châssis

A l'aide d'une clé allen #4 et d'une clé à pipe #10, vissez les les platines sur le châssis.

⚠ Attention : l'encoche de la platine doit être vers l'arrière du fauteuil. Il n'y a pas de sens Gauche / Droit sur les platines châssis.

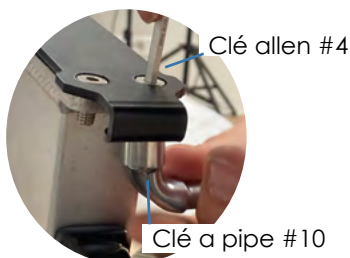

L'encoche de la platine châssis doit se trouver vers l'arrière du fauteuil

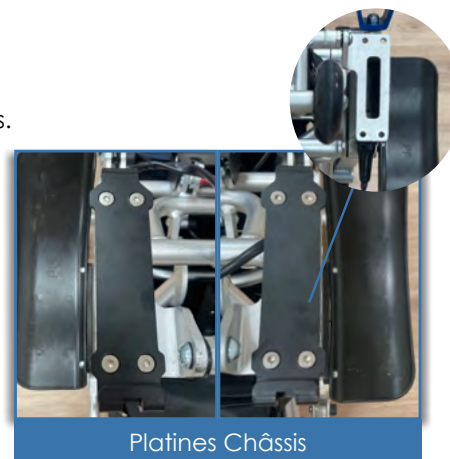

ETAPE 3

Branchement des câbles d'extensions

Branchez les câbles d'extension sur le Master Contrôleur, enroulez 1 tour autour du tube, fixez-les avec des serflex.



Mettre les roues servomoteurs

- 1** Insérez la tige dans fente en approchant la roue du châssis en passant le câble par dessous



Passer le câble par dessous



- 2** Clipsez et appuyez sur la grenouillère




- 3** Insérez le piston en appuyant sur le bouton

! Le bouton débrayage doit être baissé pour mettre le piston



⚠ LES PISTONS SONT OBLIGATOIRES


- 4** Branchez le câble

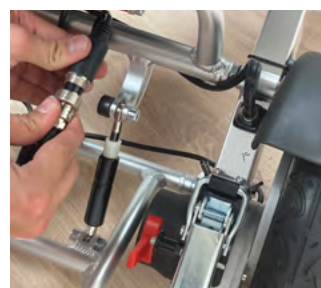

Puis faites la même opération sur la deuxième roue

Enlever les roues servomoteurs

- 1** Débranchez le câble

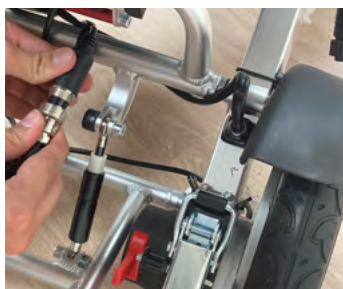

- 2** Enlevez le piston en appuyant sur le bouton

! Le bouton débrayage doit être baissé pour enlever le piston



- 3** Déclipsez la grenouillère



- 4** Détachez la roue



Puis faites la même opération sur la deuxième roue